

Diese Anleitung enthält die wichtigsten Punkte, die Sie für das Bedienen der Anlage wissen müssen.

1. RUFAUSLÖSUNG




An Geräten mit diesem Symbol kann ein Ruf ausgelöst werden:

Rufauslösung am Bett



Rufauslösung im WC

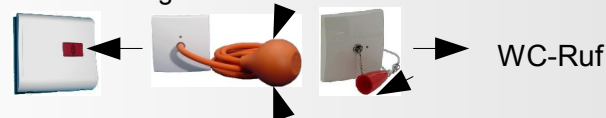

In allen Rufgeräten befindet sich eine **Beruhigungslampe**. Sie zeigt dem Patienten an, dass sein Ruf von der Anlage angenommen wurde.

1.1 SCHWESTERNOTRUF (Hilfe holen)

Wenn Sie die Anwesenheit eingeschaltet haben, können Sie mit den Ruftasten folgende Rufe auslösen:

Im Zimmer oder am Bett

Schwesternotruf 

Im Bad / WC

Wenn Sie ein beliebiges Rufgerät betätigen, lösen Sie einen WC-Notruf aus.

1.2 AUTOMATISCH AUSGELOSTE RUFE

Diagnostikruf:

Diese Rufe werden von den angeschlossenen Überwachungsgeräten automatisch ausgelöst. Mit den unten aufgeführten Adaptern, werden die Geräte mit der Rufanlage verbunden.



Diagnostikrufmodul 1-fach



Diagnostikrufmodul 6-fach

Die Abstellung erfolgt durch das Setzen der Anwesenheit und durch die Abstellung des Alarms am Überwachungsgerät. Wird der Alarm nicht am Überwachungsgerät abgestellt, so erfolgt innerhalb der nächsten 2 Minuten wiederum eine Diagnostikruf-Auslösung.

Steckerruf

Dieser Ruf wird automatisch ausgelöst, wenn der Stecker eines beweglichen Rufgerätes (Birntaster oder Patientenhandgerät) versehentlich aus der Steckdose gezogen wird.

2. ANWESENHEIT



Das Markieren der Anwesenheit ist unbedingt erforderlich, damit die akustische Rufnachsendung arbeitet!



a)



b)

Beim Betreten eines Zimmers schalten Sie mit der Anwesenheitstaste (a) oder dem Anwesenheitsquittiersender (b) Ihre Anwesenheit ein.

Beim Verlassen des Zimmers drücken Sie erneut Ihre Anwesenheitstaste, um die Anwesenheit wieder auszuschalten.

Mit dem Einschalten der Anwesenheit bewirken Sie folgendes:

- Ein im Zimmer vorhandener Ruf wird gelöscht.
- Sie werden durch ein hörbares Signal über weitere Rufe informiert (= akustische Rufnachsendung)

3. RUFBEARBEITUNG AM RUFORT

Ruf abstellen

Im Zimmer stellen Sie Rufe mit der Anwesenheitstaste oder dem Anwesenheitsquittiersender ab. WC-Rufe stellen Sie im Bad/WC mit der Abstellstaste ab.



WC-Rufe löschen ohne Abstellstaster

Vor dem Abstellen des Rufes müssen Sie an der Zimmerelektronik die Anwesenheit markiert haben. Nun müssen Sie den Ruftaster so lange betätigen (ca. 4 Sek.) bis die Beruhigungslampe ausgeht. Dann ist der WC-Ruf gelöscht.



Zimmer mit mehreren Betten:

Vor dem Abstellen des Rufes können Sie an der Beruhigungslampe erkennen, an welchem Bett gerufen worden ist.

4. RUFBEARBEITUNG IM DIENSTZIMMER




Dienstzimmerdisplay

4.1 Displayanzeige

Alle Rufe, Meldungen und Störungen werden im Display mit 4 Zeilen à 20 Zeichen angezeigt:


Display im Rufmodus:

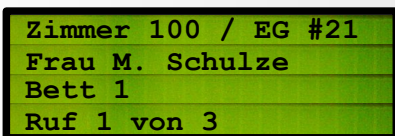

Dabei bedeuten:

1. Zeile = Rufort
2. Zeile = Patienten/ Bewohner Name
3. Zeile = Rufart
4. Zeile = Rufanzahl

Display im Ruhemodus:

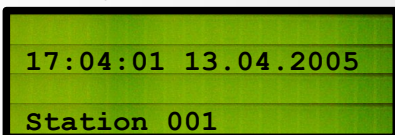

Dabei bedeuten:






1. Zeile = leer
2. Zeile = Uhrzeit / Datum
3. Zeile = leer
4. Zeile = Benutzer

4.2 Tastenfunktionen:

	Aufwärts scrollen		Anwesenheit
	Abwärts scrollen		Blättern aufwärts
	Links scrollen		Blättern abwärts
	Rechts scrollen		Lautstärke +
	Bestätigen / Enter		Lautstärke -
			Aktueller Ruf „Stumm“

5. BEDIENUNGSABLAUFE

5.1 Anmelden am Dienstzimmerdisplay



1. Anwesenheit  deaktivieren und  aktivieren.
2. Innerhalb von 2 Sekunden  Enter-Taste drücken.
3. Mit der  Scroll-Taste den Benutzer auswählen. (Ausgewählt ist der oberste Benutzer, bei dem der Cursor blinkt)
4. Mit der  Enter-Taste bestätigen.

Wird die Anwesenheitstaste aktiviert, ohne den Benutzer auszuwählen, so bleibt der zuletzt ausgewählte Benutzer aktiv.

5.1.1 Organisationsgruppenübergreifende Nachtschaltung


Ist eine solche Nachtschaltung konfiguriert, wird bei Auswahl dieser Nachtschaltung an einem Dienstzimmerdisplay, auch in alle anderen Dienstzimmerdisplays die Nachtschaltung aktiviert. Bei Rückstellung der Nachtschaltung an einem Dienstzimmerdisplay erfolgt auch die Rückstellung an allen anderen Dienstzimmerdisplays, auf den zuletzt eingestellten Benutzer.

5.2 Summerlautstärke einstellen

1.  Taste drücken um lauter zu stellen.
2.  Taste drücken um leiser zu stellen.

5.3 Aktuellen Ruf stumm schalten


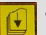
Sie können den im Display angezeigten Ruf „Stumm“schalten. Eine weitere Rufnachsendung erfolgt erst, wenn ein neuer Ruf eingeht, oder wenn das Display aus und wieder eingeschaltet wird.

1.  Taste drücken um den aktuell sichtbaren Ruf „Stumm zu schalten.

5.4 Blättern bei mehreren Rufen

Wenn mehr als ein Ruf ansteht wird dies in der untersten Zeile des Displays angezeigt. z.B.:

Ruf 001 von 003

1.  Taste drücken um den nächsten Ruf anzuzeigen.
2.  Taste drücken um zurück zu blättern.